

# KATALOG

MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o.  
Huřská 273, 272 01 Kladno

## PODKOŽNÍ PLYNOVÉ INJEKCE INDAP



KATALOG PRODUKTŮ | DÁVKOVAČE CO2 - PODKOŽNÍ PLYNOVÉ INJEKCE

[www.dimap.cz](http://www.dimap.cz)  
[www.dimap.cz/katalog](http://www.dimap.cz/katalog)



+ 420 608 340 621



[info@dimap.cz](mailto:info@dimap.cz)

# CO<sub>2</sub>



## SADY INDAP INSUF

### KOMPLETNÍ SADA INDAP INSUF

DÁVKOVAČ PLYNOVÝCH INJEKČÍ CO<sub>2</sub> – INDAP INSUF (dvě paměti)

Sada obsahuje: Přístroj INDAP INSUF (aplikační dávka 0,1-50ml)

Medicínální ventil s filtrem a hadičkou

Aplikátor

Návod k obsluze

Knihka Plynové injekce

5x jehla Terumo Agani (vzor)

Kvalitní dvoustupňový redukční ventil CO<sub>2</sub>

Vhodné i pro KARBOXYTERAPII

Medicínální tlaková lahev CO<sub>2</sub> není součástí sady

Zákazník si zajistí pronájem např. od firmy LINDE GAS



### INFORMACE OD VÝROBCE

Zařízení se skládá z řídicího přístroje generujícího aplikační dávky (vybaveného digitálním displejem), aplikátoru injekcí, vstupního filtru 50 $\mu$  a medicínálního redukčního ventilu CO<sub>2</sub>. Redukční medicínální ventil připojený na medicínální CO<sub>2</sub> tlakovou lahev redukuje tlak CO<sub>2</sub> z tlakové lahve na přednastavený výstupní tlak 1bar. Obsluha má okamžitý přehled o správném nastavení redukčního ventilu. Následně je CO<sub>2</sub> veden hadičkou s filtrem mechanických nečistot 50 $\mu$  do řídicího přístroje INDAP Insuf, kde se nachází zásobník plynu. Z tohoto zásobníku je při stlačení tlačítka na aplikátoru veden CO<sub>2</sub> do aplikátoru, kde je přes trysku 0,15mm dávkován v přednastavené aplikační dávce.

KATALOG PRODUKTŮ | PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENĚ SE OBRÁTE NA VÝROBCE

[www.dimap.cz](http://www.dimap.cz)  
[www.dimap.cz/katalog](http://www.dimap.cz/katalog)



+ 420 608 340 621



[info@dimap.cz](mailto:info@dimap.cz)



## PŘÍSTROJ INDAP INSUF

S příslušenstvím (návod k obsluze, kniha plyn.inj.)

Bez redukčního ventilu

Dvě paměti pro rychlou volbu

Vhodné i na KARBOXYTERAPII



## APLIKÁTOR

Černý design

Odlehčený

Anticor špička

Vysoká spolehlivost

Tlačítko pro dávkování

Průměr 20mm



## SET REDUKČNÍ VENTIL + FILTR

Dvoustupňový medicínální redukční ventil CO<sub>2</sub>

Přesný tlak na výstupu

Dva stupně zaručují vyšší bezpečnost

Přednastavený na 1 bar

2 manometry

Vysoká SPOLEHLIVOST

